


Anleitung zur Gewinnung einer kurzen Haarprobe (Haarkarte)

laborkrone

Zwei bleistiftdicke Haarsträhnen **unter 10 cm Länge** (A- und B-Probe) sind vorzugsweise am Hinterkopf des Probanden zu entnehmen, wobei die jeweilige Haarsträhne auch aus mehreren dünneren Haarsträhnen zusammengelegt werden kann. Die Ausrichtung der Haare muss hierbei einheitlich sein.



- 1** Die Haarsträhnen so nah wie möglich an der Haut abschneiden (Resthaarlänge ≤ 1 mm).

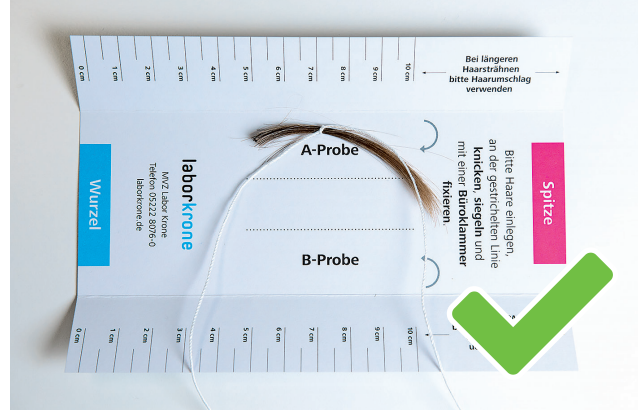

- 2** Die Haarsträhnen in die Haarkarte einlegen. Das wurzelseitige Ende hierbei wie auf der Karte angegeben in Richtung Unterseite (Wurzel, Skala 0 cm) legen.



- 3** Bei Haarsträhnen über 10 cm Länge verwenden Sie bitte unseren Haarumschlag (siehe Rückseite)



- 4** Seitenlaschen an den vorgestanzten Kanten über die Haarsträhnen knicken und mit Hilfe von Büroklammern fixieren sowie mit Sicherheitsiegel versehen.



- 5** Die Haarkarte in den mitgelieferten Beutel einlegen und verschließen. Bitte nur eine Karte pro Beutel verwenden!

Die Rückseite der Haarkarte sowie den Anforderungsschein (Belegtyp 4) mit den notwendigen Informationen sowie Barcode versehen (siehe auch »Erläuterungen Belegtyp 4«). Haarkarte und Belegtyp 4 für den Versand zusammen in eine Versandtasche legen.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf der Rückseite.

Für Haarsträhnen über 10 cm bitte wenden →