



Russisch

Инструкция для родителей

ПЦР-тест на SARS-CoV-2

ЛЕДЕН-
ЦОВЫЙ
ТЕСТ

Индивидуальная проба для индивидуального PCR-тестирования

Фамилия ребенка _____

1



Извлеките тампон

Извлеките крышечку с тампоном из пробирки.


2



Осуществите забор пробы

Рассасывайте тампон в течение примерно 30 секунд.

6

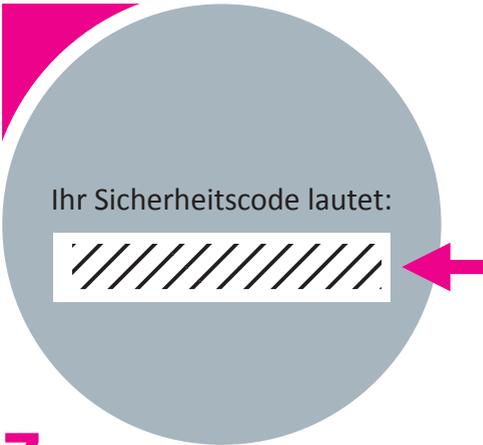

Код безопасности

В последнем поле введите этот код безопасности.

Важно:
без регистрации невозможно будет получить результат теста!

При возникновении проблем с регистрацией обратитесь в свою школу.

7



Сдача пробирки

Сразу же отнесите пробирку в свою школу, не позднее 8.30 часов.

Результат Вы получите по почте. Также существует возможность узнать результат по Интернету.


8



Получение результата по Интернету

Загрузите приложение Mein-Laborergebnis здесь или зайдите на веб-сайт <https://mein-laborergebnis.de>

9

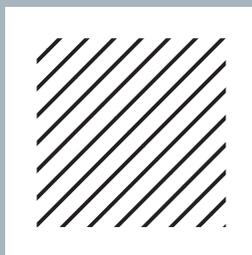

GUID:

Отсканируйте QR-код или укажите номер QR-кода (GUID).

Нажмите Ergebnis ermitteln («Получить результат»).

10

Sicherheitsabfrage

Bitte geben Sie Ihr Geburtsdatum an:

Bestätigen

Далее введите дату рождения ребенка.

Нажмите Bestätigen («Подтвердить»).

Теперь PDF-файл с результатами Вашего обследования готов к скачиванию.

Что произойдет при получении положительного результата теста?

В случае положительного результата Ваш ребенок не должен контактировать с другими людьми. Положительный результат теста также придет в учреждение здравоохранения вашего региона, представитель которого свяжется с Вами! С вопросами обращайтесь, пожалуйста, к классному руководителю или школьному координатору.