




## Anleitung für Schul-Koordinator

# SARS-CoV-2-PCR

**LOLLI  
TEST**

## Sammelprobe für Pool-PCR

1

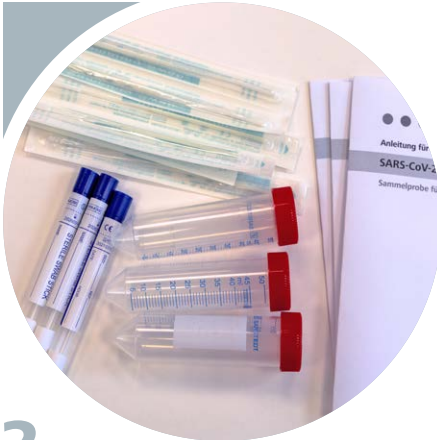

### Material ausgeben

Die Probenröhrchen und Tupfer werden an den/die Klassenlehrer/ in verteilt.

2



### Proben entgegennehmen

Der Schul-Koordinator erhält das befüllte Probenröhrchen zurück.


# 3



## Barcode aufkleben

Barcode aus dem Barcodeheft in Längsrichtung senkrecht und mittig auf das Schraubgefäß kleben.

# 4

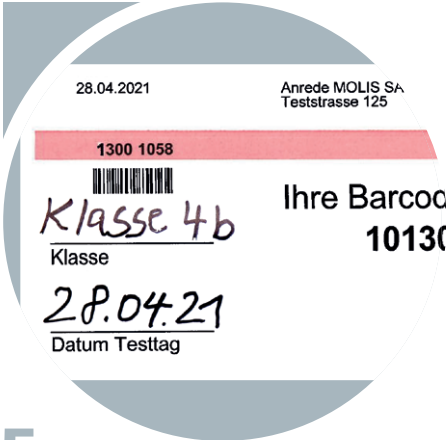

## Barcodeheft ausfüllen

**Klasse und Testtag** in das Barcodeheft eintragen.

# 5



## Versandbeutel packen

Mit Barcode versehene Röhrchen gesammelt in den Versandbeutel stecken. Den Versandbeutel dem Kurier übergeben.

6



## Testergebnis

Bis 6 Uhr des Folgetages wird das Testergebnis automatisch an Sie übermittelt.

7



## Einzel-PCR-Test

Bei positivem Testergebnis betroffene Klasse benachrichtigen und **Einzel-PCR-Tests** durchführen lassen.

Beachten Sie dazu die Anleitung »Einzel-PCR-Testung«.

8



## Entgegennehmen der Röhrgchen für die Einzel-PCR-Tests

Verpacken der **Einzel-PCR-Röhrgchen** in den roten Transportbeutel und Übergabe an den Kurier.

