



labor**krone**

Anleitung für Klassenlehrer

**SARS-CoV-2-PCR**

**Sammelprobe für Pool-PCR**

**LOLLI  
TEST**

1



## Tupfer für Pool-PCR-Test vorbereiten

Für die Pool-PCR-Tests werden die Tupfer **ohne Probenröhrchen** verwendet. Diese der Verpackung entnehmen und an die Schüler verteilen.

2



## Probenentnahme

Die Schüler sollen etwa **30 Sekunden** an den Tupfern lutschen.

3



## Abknicken

Tupfer im Schraubgefäß sammeln und an der Sollbruchstelle (siehe Pfeil) über dem Rand des Gefäßes abknicken. Anschließend das Gefäß fest zuschrauben.

# 4



## Schraubgefäß beschriften

Mit einem Folienstift das Schraubgefäß mit Klassennamen und Datum der Abnahme beschriften.

# 5



## Übergabe der Proben

Das Schraubgefäß wird dem Schulkoordinator übergeben. Dieser klebt die Barcodes auf die einzelnen Schraubgefäße der Klassen, dokumentiert die Proben im Barcodeheft und übergibt sie gesammelt an den Kurier.

# 6



## Material für die Einzel-PCR-Tests ausgeben

Pro Schüler je ein Probenröhrchen mit enthaltenem Tupfer und eine »Anleitung für Eltern« für die Einzel-PCR-Tests ausgeben.

